

UKLEAN ENZIMATIC



URZKEN
COMERCIAL E INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA | DETERGENTE ENZIMATICO DE USO CLÍNICO

Descripción.

UKLEAN ENZIMATIC es un detergente levemente alcalino y biodegradable a base de enzimas inocuas que degradan y eliminan proteínas, presentes en instrumental clínico, endoscopios, instrumentos de fibra óptica, material quirúrgico, etc. De Hospitales, Clínicas, Centros Dentales, Laboratorios Clínicos, Veterinarias, etc. Efectivo en agua fría y dura, contiene inhibidor de corrosión, por tanto, puede ser usado en limpieza manual, equipos de ultrasonido, equipos de lavado y remojo.

Propiedades fisicoquímicas.

- Estado físico: Líquido viscoso de color ámbar.
- pH: 8,5 +/- 1
- Densidad a 20° C: 1,04 +/- 0,03
- Solubilidad: Completamente en agua, dura o blanda
- Biodegradable: Si
- Libre Fosfatos: Si

Usos y dosificación.

Preparar la solución en el momento de uso tomando la cantidad justa de producto puro. Nunca devolver producto al envase original. Descartar la solución de lavado cuando aparezca sucia o su eficiencia de lavado decaea.

Limpieza Manual y Remojo: Hacer una dilución 1: 125 (8 cc de producto en 1L de agua tibia o fría) para sobre carga de materia orgánica duplicar la dosis. Poner el instrumental en la solución y dejar en remojo hasta que la suciedad sea removida del instrumental (5 a 10 minutos). Enjuague prolijamente.

Limpieza por Ultrasonido: Hacer una dilución de 1: 125 a 1:500 (8 cc a 2 cc de producto por litro de agua), a la cámara de limpieza.

Lavadoras de Instrumental: Ajustar la bomba dosificadora de manera tal que se dispense de 10 cc a 3 cc de producto por litro de agua en el ciclo de lavado (La alimentación dependerá de la calidad de agua y el tipo de máquina lavadora)

Limpieza Manual de Endoscopios: Hacer una dilución de 1:125 (8 cc por 1L de agua) y seguir las instrucciones del fabricante para el lavado.

Almacenamiento y manipulación.

UKLEAN ENZIMATIC es un producto industrial a base de ingredientes químicos y Biológicos por lo que debe ser manipulado con precaución, manteniendo el envase original tapado, lejos del alcance de los niños. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con agua en chorro suave durante 15 minutos, si la molestia persiste ver médico. Si cae en la piel, lavar prolijamente con agua que escurre y si hay irritación aplicar crema humectante. Para los derrames del producto se debe recoger con material absorbente y guardar en recipientes adecuados hasta su disposición final.

Presentación.

- Envases plásticos de 5, 10, 20, 210 kilos..

